

Arnés de postura generación 2

El arnés de postura se utiliza para :

- Transportar en toda seguridad las personas con necesidades especiales, tales como trastorno del espectro Autista, Asperger, personas con comportamiento difícil o desafiante.
- Proporcionar un apoyo postural a las personas con discapacidad física o falta de control muscular durante el transporte.




Descripción:

- **Nuevo diseño ergonómico** con respaldo ajustable
- **Nuevo sistema de evacuación de emergencia**, accesible detrás del asiento o por el maletero
- **Fabricado en Francia** en material de neopreno.
- **Adaptable y duradero:** se puede usar con un asiento elevado y tiene cinturones ajustables para adaptarse al niño en crecimiento
- **Universal:** adaptable a todo tipo de asientos
- **Seguro:** provista de siete hebillas bloqueables y un juego de llaves
- **Fácil de transportar** en coche, autobús, viaje



Opciones:

- **Reposacabezas** regulable en altura con soporte frontal
- Juego de 2 cinturones adicionales para instalación de asiento individual
- Nuevo sistema de **evacuación de emergencia ESCAPE BOX**
- Modificaciones: **posibilidad de personalizar el arnés**

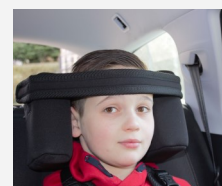

Arnés de postura

Información importante: El cinturón de seguridad sigue siendo obligatorio durante el uso del vehículo. Le recomendamos consultar la normativa del país con respecto a los cinturones de seguridad del coche antes de utilizar el arnés. La utilización del arnés del vehículo queda a cargo y responsabilidad del conductor.

Instalación

Base (A)



Respaldo ajustable (B)




Chaleco frontal (C)



Instalación asiento estándar : hay espacio entre el respaldo del asiento y el asiento

1. Separar la base (A+ B) del chaleco frontal de retención (C).
2. Coloque la base (A+B) sobre el respaldo del asiento. Si necesario, plegar el asiento hacia adelante para pasar las correas que van alrededor el asiento.
3. Acortar y apretar los cinturones al máximo para asegurarse que no flota.
4. Una vez que la persona esta sentada cómodamente, tomar el chaleco frontal de retención (C) y acortar contra la base (A + B). Ajustar las 7 correas y bloquear, si necesario.
5. Devuelva la parte inferior del cinturón como se muestra en la imagen.

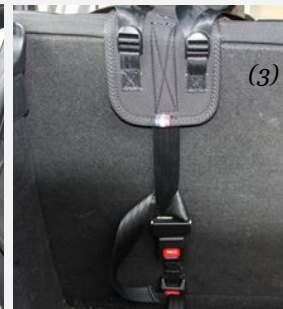

Instalación asiento individual : no hay espacio entre el respaldo del asiento y el asiento

Los pasos de instalación son los mismos que para el asiento estándar. **2 cinturones adicionales** son necesarios y disponibles en opción para el arnés.

1. Un cinturón adicional se fija detrás del asiento y ayuda a que la base (A+ B) rodea todo el asiento, no solo el respaldo
2. El segundo es para fijar entre el asiento y el respaldo. Tense el cinturón al máximo para que el arnés no flote.



Información importante: El sistema estándar de evacuación de emergencia es accesible detrás del asiento o por el maletero. Solo necesita hacer clic en los 2 botones rojos al mismo tiempo y la persona puede salir del automóvil junto con el arnés.



Que tenga un buen viaje!