

android & iOS

Pregunte a su asistente de voz MyPermobil

- ¿Cuál es el nivel actual de la batería?
- ¿Cuándo cargué por última vez?
- ¿Cuál es mi autonomía estimada?
- ¿Hasta dónde puedo conducir con la carga actual de la batería?
- ¿Con qué frecuencia cambié de posición hoy?
- ¿Cuáles son mis registros de uso?
- ¿Cuál es el número de serie de mi silla de ruedas?

- 1 Abra la aplicación Alexa y toque el icono de menú y luego “Habilidades y juegos”.
- 2 Haga clic en la pestaña “Sus habilidades” y busque “MyPermobil”.
- 3 Haga clic en la “Habilidad MyPermobil”.
- 4 Haga clic en el botón “Habilitar para usar”.
- 5 Haga clic en Configuración y elija “Vincular cuenta”.
- 6 Elige tu región.
- 7 Ingrese la dirección de correo electrónico de su cuenta MyPermobil y presione continuar.
- 8 Espere hasta que obtenga un código de verificación y péguelo en el cuadro de texto del código de verificación y presione “Verificar cuenta”.
- 9 Su aplicación Amazon Alexa y MyPermobil ahora están vinculadas.

Guía de configuración rápida para vincular MyPermobil a dispositivos Google

android

- 1 Abra la aplicación Google Home .
- 2 En la parte superior derecha, haga clic en el icono de su cuenta
- 3 Verifique que la cuenta de Google que se muestra sea la vinculada a su altavoz o pantalla. Para cambiar de cuenta, toque otra cuenta o “Agregar otra cuenta”.
- 4 Haga clic en “Configuración del asistente” y luego en “Explorar”.
- 5 Desplácese por la lista de aplicaciones del Asistente. Elija la tarjeta MyPermobil (Nota: debe tener la aplicación MyPermobil descargada en su dispositivo móvil).
- 6 Haga clic en el texto azul del “enlace”.
- 7 Elige tu región.
- 8 Ingrese la dirección de correo electrónico de su cuenta MyPermobil y presione “Continuar”.
- 9 Espere hasta que reciba un código de verificación por correo electrónico y péguelo en el cuadro de texto de verificación y presione “Verificar cuenta”.
- 10 Su aplicación Google Home y MyPermobil ahora están vinculadas.

iOS

- 1 Abra la aplicación Google Assistant (iOS) .
- 2 En la parte superior derecha, toca tu cuenta.
- 3 Verifique que la cuenta de Google que aparece en la lista sea la cuenta de Google que vinculó a su dispositivo Google Nest o Home. Para cambiar de cuenta, toque el triángulo junto a la cuenta de Google, luego toque otra cuenta o Agregar otra cuenta.
- 4 Regrese a la pantalla de inicio, luego toque “Explorar” en la parte inferior derecha.
- 5 Desplácese por la lista de aplicaciones del Asistente. Elija la tarjeta MyPermobil (Nota: debe tener la aplicación MyPermobil descargada en su dispositivo móvil).
- 6 Haga clic en el texto azul del “enlace”.
- 7 Elige tu región.
- 8 Ingrese la dirección de correo electrónico de su cuenta MyPermobil y presione “Continuar”.
- 9 Espere hasta que reciba un código de verificación por correo electrónico y péguelo en el cuadro de texto de verificación y presione “Verificar cuenta”.
- 10 Su Asistente de Google y la aplicación MyPermobil ahora están vinculadas.